

Diaclean

Diaclean ist eine Waschlösung zur Reinigung der Apertur der DL3 und DLB5 Hämatologieanalysatoren

REF	Inhalt
H19170	- 250 mL Natriumhypochloritlösung

Nur für in-vitro Gebrauch.

ALLGEMEINE INFORMATION

Methode	Manuelle Reinigung
Haltbarkeit	3 Jahre ab Produktionsdatum
Lagerung	+15-25 °C

VERWENDUNGSZWECK

Diaclean ist eine Waschlösung zur Reinigung der Apertur der DL3 und DLB5 Hämatologieanalysatoren

DIAGNOSTISCHE BEDEUTUNG

Für genaue Messungen ist es wichtig, die Blende sauber zu halten, daher wird die Verwendung der Diaclean Lösung nach allen 1000 Messungen empfohlen.

REAGENZZUSAMMENSETZUNG

Natriumhypochloritlösung (<5%)
 Destilliertes Wasser

REAGENZVORBEREITUNG

Diaclean ist gebrauchsfertig.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- Diaclean:
- darf niemals unter Temperaturen 15 °C und über 25 °C ausgesetzt werden.
 - Darf 120 Tage lang (16 Wochen) nach dem Öffnen gelagert werden.
 - Darf 3 Jahre lang gelagert werden (siehe Ablaufdatum auf dem Etikett) ab

Produktionsdatum.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nur für in-vitro Gebrauch.
- Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt (MSDS).
- Das Reagenz nicht direkt nach dem Transport oder nach der Handhabung verwenden. Warten Sie ein paar Minuten.
- Reagenzien können Reizungen der Augen, der Haut und der Schleimhäute verursachen.
- Im Falle eines Kontakts gründlich mit Wasser abspülen und sofort ärztliche Hilfe suchen!
- Verwenden Sie Reagenzien nicht über das Ablaufdatum oder über die vorgegebene Verwendungsdauer, nach dem Öffnen der Flasche, hinaus.
- Reagenzien nicht mischen, unabhängig davon, ob sie der gleichen Art oder Charge entsprechen.
- Verwenden Sie keinen leeren Behälter wieder. Sie riskieren damit die Ergebnisse zu verfälschen und das Gerät zu beschädigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Falle einer Beschädigung der Außenverpackung.
- Wenn die Reinigungslösung versehentlich verschüttet wurde, wischen Sie sie sofort mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Anzeichen einer Verschlechterung (Trübung, Farbwechsel usw.)

TESTDURCHFÜHRUNG

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Benutzerhandbuch für den jeweiligen Analysator.

ABFALLENTSORGUNG

Die nationalen gesetzlichen Bestimmungen beachten.

VERWENDETE SYMBOLE



Entsorgen Sie die Kontrollen und Verpackung ordnungsgemäß

